

Lammepumpe

med mageslange for tilføring av næring til svake, nyfødte lam

- Ta stempelet ut av sprøyta før du begynner.
- Sonden skal føres forsiktig gjennom munnen på lammet og ned i spiserøret. Vær forsiktig, bruk god tid, prøv å få lammet til å svelge sonden.
- Legg aldri ned sonde på et bevisstløst lam.
- Er du usikker på om sonden er i spiserøret, prøv å lytt gjennom sprøyta/sonden. Kan du høre lammet puste, har sonden kommet ned i lungene. Trekk den ut igjen og prøv på nytt.
- Det beste er om melka får renne fra sprøyta av seg selv. Er råmelka tjuk, må du sette i stempelet og presse melka gjennom. Bruk god tid.

