

OS

ID  
TST

# OS ID TST – kombinerer effektiv innhenting av vevsprøver med merking

OS ID TST (tissue sampling tag) er et banebrytende verktøy som gir deg muligheten til å høste en vevsprøve fra dyrets øre samtidig som du merker det, alt i ett enkelt grep.

Metoden, som egner seg best for storfe og andre drøvtyggere, er både effektiv og sikker og kan benyttes allerede fra dagen etter at dyret er født.

## Avlsarbeid og sykdomsbekjempelse

OS ID TST øremerker egner seg svært godt til arbeid som krever analyse av vevsprøver.

Analysen gir husdyrreieren solid grunnlag for å ta gode beslutninger for eksempel når det gjelder utvelgning av produksjonsdyr for avl.

I flere europeiske land har tissue sample tags spilt en sentral og vellykket rolle i arbeidet med systematisk bekjempelse av sykdommen bovin virusdiarévirus (BVDV).

## Enkelt og brukervennlig utstyr

Med OS ID TST øremerker kan du lett samle fullgode vevsprøver uten bistand fra fagfolk. OS ID TST øremerker leveres i sett,

bestående av tappdel og nål, hulldel og en hygienisk tube i plast for oppbevaring av prøver. Prøvene tas enkelt med en spesialtang, Combi Junior TST.

Når prøven er tatt, trekkes nåla automatisk ut fra tappdelen. Nåla står fast i tanga, og du lukker og forsegler vevsprøven ved å plassere tuben over nåla mens den står i tanga.

Vevsprøven oppbevares dermed i nåla i plasttuben, og tuben sendes til analyse.

## Sikkert

Hver prøvetube er merket med en unik strekkode og samme unike nummer som merkene. Dette gir sikker registrering og sporing på individnivå.

## Skånsomt for dyret

Bruken av OS ID TST øremerker er skånsomt for dyret. Med en nåldiameter på bare 3 millimeter etterlates kun et lite hull i øret hvor merket sitter godt fast.

### Bruksområder for OS ID TST

- Avlsarbeid
- Forskning
- Sykdomsbekjempelse

### Merketyper, størrelser og farge

- OS ID TST Stor: 70 x 57 mm
- OS ID TST Rund: Ø 28 mm
- Leveres i gul farge



OS ID TST Large



OS ID TST Junior Applicator



OS ID TST Button

OS ID TST leveres i sett med øremerke, nål og tube for vevsprøve. Du kan velge mellom flere typer merker og tuber. Det er også mulighet for en elektronisk merkeløsning. Til påsetting brukes tanga Combi Junior TST.

OS ID®  
2550 Os i Østerdalen

Kundeservice: tlf. 62 49 77 00  
post@osid.no

www.osid.no  
www.osidbloggen.no

