

# Phillips 50 ml halvautomatisk doseringsprøyte

Phillips halvautomatisk doseringsprøyte egner seg særlig godt for mindre besetninger. Dette er ei solid, holdbar sprøyte som forenkler og effektiviserer doseringen.

Sprøyta forhåndsinnstilles enkelt på doser på 1, 2, 3, 4 eller 5 ml.

Ergonomisk grep reduserer belastningen på hånda.



*Phillips halvautomatisk doseringsprøyte i hardplast, med sylinder i polypropylen og munnstykke i metall.*

## BRUK AV SPRØYTA

1. Sprøyta og munnstykket må være sterilisert før bruk.
2. Rist medisinen godt og hell den i en ren beholder.
3. Sett inn munnstykket og skru det fast med låsemutteren.
4. Drei mengderegulatoren til den ønskede mengden er på linje med pilen på toppen av sprøyta.
5. Slå av låsefunksjonen ved å dra låseknappen bakover. Skyv stempelstanga helt fram i sprøyta.
6. Før munnstykket ned i medisinbeholderen og sug sprøyta full. Trykk ut og sug inn en gang ekstra første gang.
7. Ved utdosering til dyret, trykk inn avtrekkeren.

Riktig rengjøring og vedlikehold sikrer optimal funksjon og forlenger sprøytas varighet.

## RENGJØRING

1. Etter bruk, skyll sprøyta og plast-sylindere med en blanding av lunkent vann og vaskemiddel.
2. Skyll deretter med lunkent vann, for å fjerne eventuelle såperester.

## VEDLIKEHOLD

1. Hold sprøyta godt fast og skru av plastsylindere.
2. Smør et par dråper silikonolje på den indre kanten av plastsylindere.
3. Skru sylindere fast igjen på håndtaket.

# Phillips 50 ml halvautomatisk doseringsprøyte

## SKIFTE AV O-RING


1. Hold håndtaket godt fast, og skru av plastsylindren.
2. Fjern o-ringen fra stempelstang.
3. Smør den nye o-ringen med et par dråper silikonolje.
4. Smør et par dråper silikonolje på den indre kanten av plastsylindren.
5. Skru sylindren godt fast igjen på håndtaket.



## DELENE I PHILLIPS DOSERINGSSPRØYTE

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| ★ 1. Munnstykke             | 9. Avtrekermekanisme |
| ★● 2. Mutter til munnstykke | 10. Høyre håndtak    |
| ★● 3. Plastsylinder, 50 ml  | 11. Nålemagasin      |
| ● 4. O-ring til stempel     | 12. Mengderegulator  |
| 5. Stempelstang             | 13. Lås              |
| 6. Knapp                    | 14. Skru x 5         |
| 7. Stempelstangføring       | 15. Venstre håndtak  |
| 8. Avtrekker                |                      |

Delesett til Phillips halvautomatisk doseringsprøyte får du kjøpt hos OS ID®. Kontakt vår kundeservice hvis du har spørsmål om denne sprøyta, eller ønsker å kjøpe delesett.

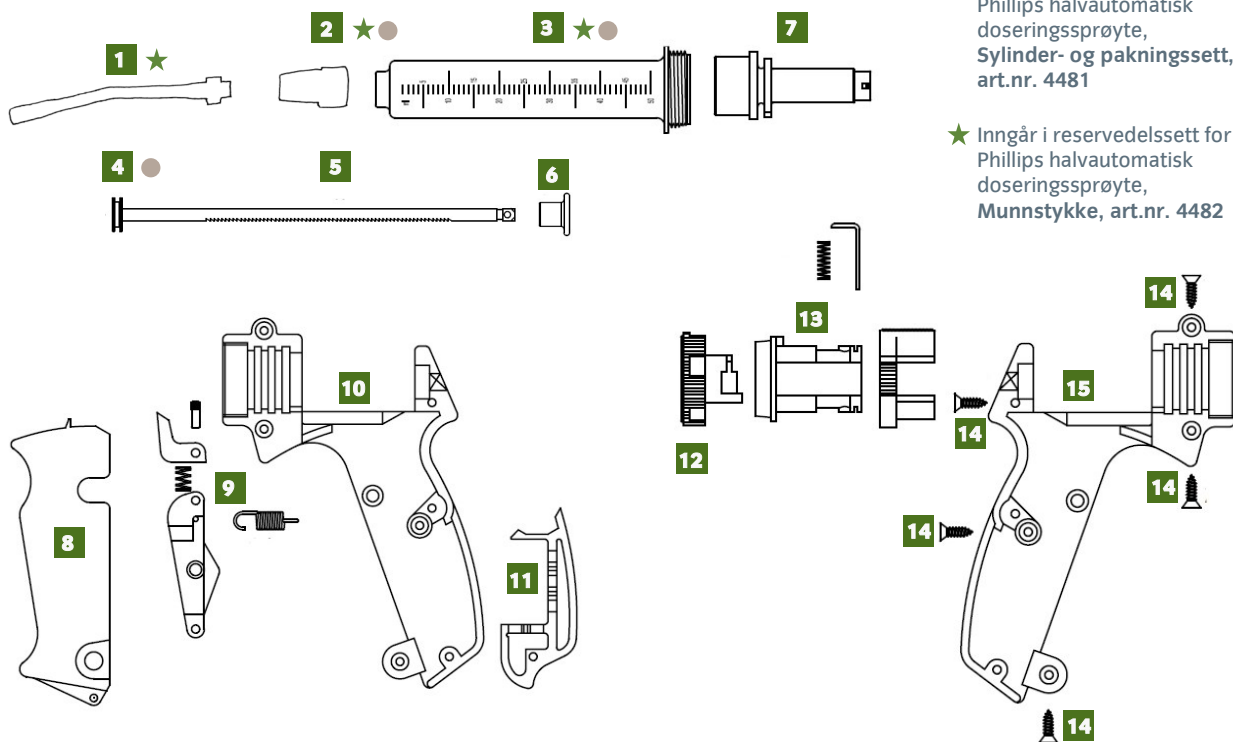

● Inngår i reservedelssett for Phillips halvautomatisk doseringsprøyte, Sylinder- og pakningssett, art.nr. 4481

★ Inngår i reservedelssett for Phillips halvautomatisk doseringsprøyte, Munnstykke, art.nr. 4482

OS ID® | 2550 Os i Østerdalen

Tlf. 62 49 77 00 | [post@osid.no](mailto:post@osid.no) | [www.osid.no](http://www.osid.no)

Vi merker levende verdier