



Påsetting av framfallsele

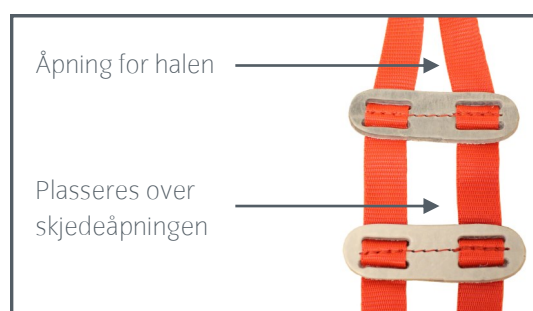

Slik setter du på selen

- 1) Legg selen over ryggen på søya. Juster selen til passende lengde med ryggreima.
- 2) Før de to bakreimene løst mellom bakbeina og opp på hver side.
- 3) Fest bakreimene løst i de to bak-klipsene.
- 4) Ta halen ut gjennom den øverste av de to åpningene i selen.
- 5) Legg nakkereima løst rundt hodet. Juster lengden på nakkereima til den sitter godt, og fest nakkereima med klips.
- 6) Stram bakreimene skikkelig. Pass på at seleåpningene for hale og skjede er riktig plassert.
- 7) Etter et døgn tid kan selen løsne noe, slik at den må reguleres på nytt.

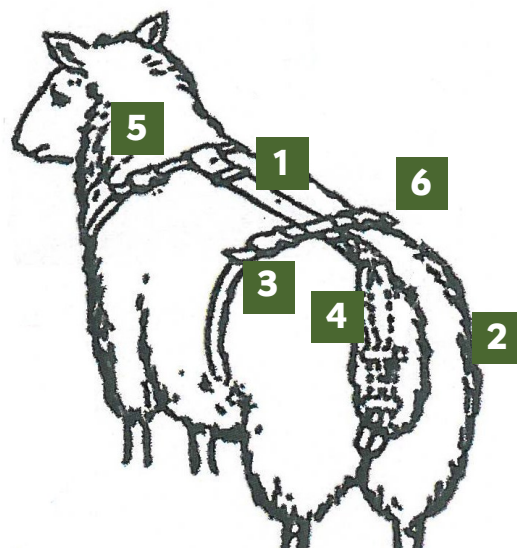

Vedlikehold

Etter bruk, vask de to delene av lær med varmt vann og la dem lufttørke. Når lærdelene er tørre, sett dem inn med litt olivenolje eller lignende for å hindre uttørring.