

# Prodigy 50 ml

## Halvautomatisk doseringsprøyte

Prodigy halvautomatisk doseringsprøyte egner seg særlig godt for mindre besetninger.

Dette er ei solid, holdbar sprøyte som forenkler og effektiviserer doseringen.

Sprøyta forhåndsinnstilles enkelt på doser på 1, 2, 3, 4 eller 5 ml.

Ergonomisk grep reduserer belastningen på hånda.



*Prodigy halvautomatisk doseringsprøyte i hardplast, med sylinder i polypropylen og munnstykke i metall. Den oransje knappen på mengderegulatoren kan byttes ut med knapp i grønt, blått eller gult (leveres sammen med sprøyta). Sprøyta leveres med munnstykke, som må skrues på.*

### Bruk av sprøyta

1. Sprøyta og munnstykket må være sterilisert før bruk.
2. Rist medisinen godt og hell den i en ren beholder.
3. Sett inn munnstykket og skru det fast med låsemutteren.
4. Drei mengderegulatoren til den ønskede mengden er på linje med pilen på toppen av sprøyta.
5. Slå av låsefunksjonen ved å trykke inn låseknappen [1]. Skyv stempelstanga helt fram i sprøyta.
6. Før munnstykket ned i medisinbeholderen og sug sprøyta full. Trykk ut og sug inn en gang ekstra første gang.
7. Ved utdosering til dyret, trykk inn avtrekkeren.

### Rengjøring

1. Etter bruk, skyll sprøyta og plastsylindren med en blanding av lunkent vann og vaskemiddel.
2. Skyll deretter med lunkent vann, for å fjerne eventuelle såperester.

### Vedlikehold

1. Hold sprøyta godt fast og skru av plastsylindren.
2. Smør et par dråper silikonolje på den indre kanten av plastsylindren.
3. Skru sylindren fast igjen på håndtaket.

Riktig rengjøring og vedlikehold sikrer optimal funksjon og forlenger sprøytas varighet.