



OS ID E24 / Combi 3000 Mini eller Små

Høyre øre

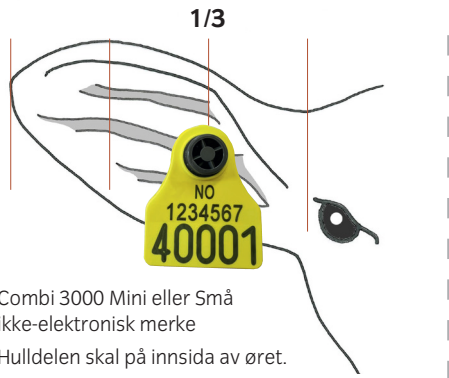


Venstre øre

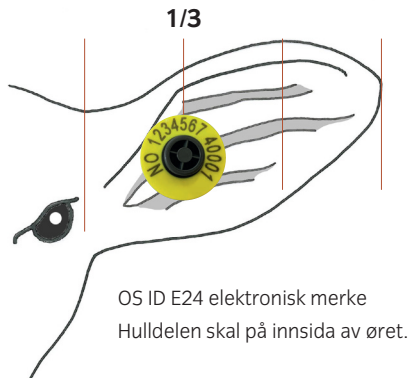

1. Merket må settes i øret med **ett** fast trykk med tanga. Det sikrer et rent, godt hull og er til mindre ubehag for dyret.
2. Merket må settes **mellom de to nederste bruskene** i øret og en tredjedel ut på øret fra ørefestet og hodet.
3. Etter at merket er satt i, **vri merkedelene litt rundt** i forhold til hverandre, for å gjøre rent sårhullet.

Bruk ei av disse tengerne:

OS ID Combi Junior Green

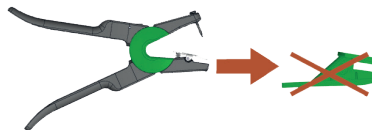

Combi Junior



Tanga gikk ut av salg nov. 2023, men kan fortsatt brukes til OS ID-merker hvis den har svart nål.

Begge disse tengerne brukes til både ikke-elektroniske og elektroniske øremerker.

NB: Ta ut plastinnsatsen i tanga.



Det elektroniske øremerket (hulldel) er festet på sin respektive tappdel. Hulldelen og tappdelen rives løs fra hverandre og er klare for isetting. Pass på å ikke blande merkedelene; hull- og tappdel **må** ha samme nummerering.